


ラディアルシーネ（手首固定具）取扱説明書

1.はじめに

- 本品は、止血時や抜管・抜針予防の為、手首を固定する固定具です。それ以外の目的で使用しないで下さい。
- 本品は、左手・右手兼用でご使用頂けます。

2.使用方法

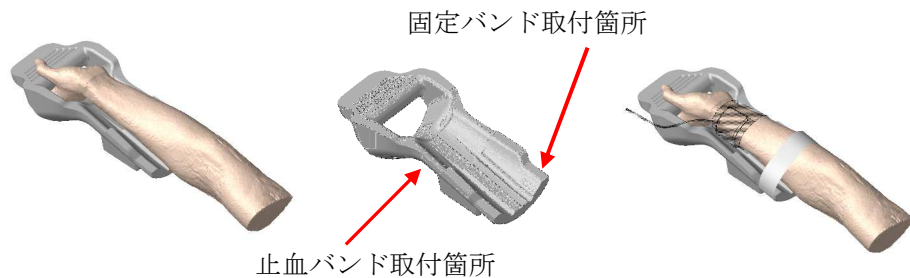

固定する手にシーネを装着します。


テープで手首を固定する場合は、別売のテープを固定バンド取付箇所に巻いて使用します。
(止血バンド、テープは本品に付属しておりません。)

3.オプション品

高さ調節が必要な場合は、オプション（別売）の専用台座をご使用ください。専用台座は、上下を入れ替えると2タイプの高さが選べます。
※専用台座はシーネ本体のいずれのサイズ（SS、S、M）にも装着が可能です。



4. オプション品の使用方法

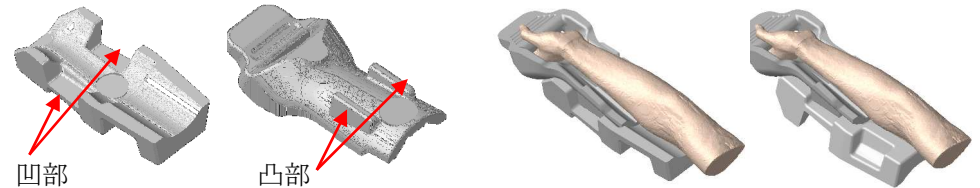

台座上部の凹部と、本体下部の凸部を合わせて、はめ込みます。

シーネ本体と専用台座を、はめ込んだ状態で、手首に装着します。

5.仕様

【製品仕様】

品名 ラディアルシーネ
材質 高密度発泡樹脂
サイズ SS、S、M
質量 約35g

【オプション品】

品名 ラディアルシーネ専用台座
材質 高密度発泡樹脂
サイズ フリー
質量 約50g

6.使用上の注意

- 過度に力を加えると破損する恐れがあります。
- 破損、汚れが目立つ場合は新しいものに交換して下さい。
- 水濡れ、直射日光、火気、高温多湿を避けて保管して下さい。

※本品の仕様等につきましては、予告なく変更になる場合があります。

【製造販売元】

社名：株式会社坂本設計技術開発研究所
住所：大阪府枚方市津田山手2丁目20-1
医療機器製造業登録番号：27BZ200271
TEL：072-897-5311 FAX：072-897-5313